



# EVERGO™ BIETET IHREN PATIENTEN MEHR UNABHÄNGIGKEIT IHR LEBEN ZU GENIEßEN

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator EverGo verfügt über eine Akkuleistung von mindestens 8 Stunden und eine Sauerstoffabgabe von 1050 ml/min; er ist auch für Flugreisen zugelassen.\*




**EINE SAUERSTOFFVERSORGUNG, AUF DIE SIE UND IHRE PATIENTEN SICH VERLASSEN KÖNNEN.**

Der Sauerstoffkonzentrator EverGo hat ein atemzuggesteuertes Sparsystem. Es kann eine maximale Sauerstoffabgabe von 1050 ml/min eingestellt werden – so können Sie sicherstellen, dass auch Ihre aktivsten Patienten ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Das Gerät erkennt den Beginn einer Einatmung und liefert so einen dosierten Sauerstoffimpuls genau dann, wenn dieser gebraucht wird.

**DURCH DIE HOHE SAUERSTOFFABGABE KÖNNEN IHRE PATIENTEN UNEINGESCHRÄNKT AKTIV SEIN**


Andere tragbare Sauerstoffkonzentratoren liefern höchstens 500 bis 750 ml Sauerstoff/min. EverGo hingegen liefert 1050 ml Sauerstoff/min in Form von voreingestellten Sauerstoff-Dosen. Die abgegebene Sauerstoffmenge wird stufenweise eingestellt und steigt mit jeder weiteren Stufe an. Das bedeutet, dass Ihre Patienten bei Bedarf mit jedem Atemzug mehr Sauerstoff bekommen und aufnehmen können.

1050 ml/min

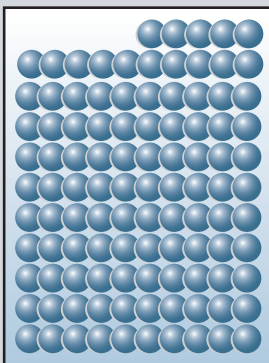

Sauerstoffkonzentrator EverGo

500 bis 750 ml/min

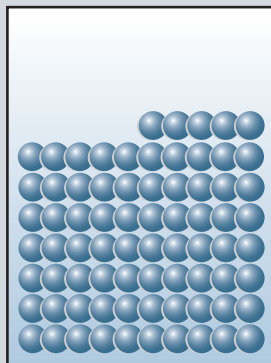

Andere tragbare Sauerstoffkonzentratoren

**EINE AKKULEISTUNG VON 8 STUNDEN<sup>1</sup> UND EINE SAUERSTOFFABGABE VON 1050 ML/MIN BEDEUTEN MEHR FREIHEIT UND LEBENSQUALITÄT FÜR IHRE PATIENTEN.**

EverGo ist die tragbare Lösung für eine Sauerstofftherapie, die Ihren aktivsten Patienten die Freiheit bietet, die sie sich wünschen. Die besonders lange Akkuleistung ermöglicht Spontaneität und Lebensfreiheit. Die hohe Sauerstoffabgabe erlaubt es den Patienten, ihre Leistungsgrenzen auszunutzen, ohne dass das Gerät diese einschränkt.

<sup>1</sup>Auf der Grundlage von 20 Atemzügen/min und der typischen Einstellung von Stufe 2.

**UNABHÄNGIGKEIT VON SAUERSTOFFLIEFERUNGEN UND DER ZULASSUNG BESTIMMTER LUFTFAHRTBEHÖRDEN GEBEN NOCH MEHR FREIHEIT.**

Wenn die Patienten nicht zuhause auf Sauerstofflieferungen warten müssen, dann können sie auf Entdeckungsreise gehen. Mit dem EverGo können sie weit mehr erkunden als je zuvor. Durch sein Gewicht von nur 4,5 kg und die Zulassung bestimmter Luftfahrtbehörden<sup>2</sup> für Flugreisen eignet sich der EverGo besonders für aktive und unternehmungslustige Patienten. Mit dem EverGo können Ihre Patienten nach Herzenslust reisen – wann und wohin sie wollen.

<sup>2</sup>Hinweis: Die Vorschriften für Flugreisen mit Sauerstoffkonzentratoren variieren. Die Patienten müssen sich vor einem Flug mit dem EverGo immer bei ihrer Luftfahrtgesellschaft nach den geltenden Regelungen erkundigen.

**MIT HILFE DER SECHS DOSIEREINSTELLUNGEN KANN DIE SAUERSTOFFTHERAPIE GENAU AUF DIE BEDÜRFNISSE DER EINZELNEN PATIENTEN EINGESTELLT WERDEN.**

EINSTELLUNG	DOSIERUNG
1	12 ml
2	23 ml
3	35 ml
4	47 ml
5 <sup>3</sup>	59 ml <sup>3</sup>
6 <sup>3</sup>	70 ml <sup>3</sup>

<sup>3</sup>Auf der Grundlage einer Atemfrequenz von 15 Atemzügen/min.





**Einfach bedienbarer Touchscreen :** Steuerung sämtlicher Funktionen des EverGo und Anzeige der verbleibenden Akkuleistung sowie der eingestellten Dosis.



**Leicht zugängliche Akkus :** Einfaches auswechseln und aufladen der Akkus. Der EverGo kann gleichzeitig geladen und angewendet werden.

**Wartungsarm :** Es ist nur ein leicht auswechselbarer Filter vorhanden, der von den Patienten gereinigt werden kann.

**Unauffälliges Design :** Der EverGo sieht nicht wie ein medizinisches Gerät aus, sondern wie eine gewöhnliche Trage- oder Camcorder-Tasche.

**Leichtgewicht :**  
Nur 4,5 kg

**RESPIRONICS® FREEDOM SERIES™ – EINE NEUE PRODUKTFAMILIE MIT EINER VÖLLIG NEUEN ART DER SAUERSTOFFTHERAPIE.**

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator EverGo gehört zur Produktfamilie Freedom Series für die Sauerstofftherapie – eine komplette Produktfamilie, die eine therapeutisch effiziente Therapie mit mehr Freiheit für den Patienten kombiniert: Produkte, die Ihnen die Sorgen, das Warten auf Sauerstofflieferungen und komplizierte Wartungen abnehmen. Die Freedom Series vereinfacht Ihnen und Ihren Patienten die Sauerstofftherapie, so dass alle Beteiligten ihr Leben genießen können.



# EVERGO™

## ZUBEHÖR

EVERGO TRAGETASCHE – In zwei Farben erhältlich  
SCHWARZ  
Z



MARINEBLAU



LITHIUM-IONEN-AKKU  
900-102



ZUBEHÖRTASCHE  
900-250



TRAGBARER ROLLENKOFFER  
900-100



12V KABEL  
900-101



NETZKABEL  
900-105



## BESTELLINFORMATIONEN

Ausstattung : tragbarer Sauerstoffkonzentrator EverGo, Tragetasche (Farboptionen), zwei Lithium-Ionen-Akkus, tragbarer Rollenkoffer, 12V- und Netzkabel, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung.

KONZENTRATORSYSTEME	BESTELLNUMMER
EverGo System mit schwarzer Tragetasche	900-020
EverGo System mit marineblauer Tragetasche	900-022
ZUBEHÖR	
Lufteinlassfilter (VE: 6 Stück)	900-150
EverGo-Tragetasche – in zwei Farben erhältlich	
SCHWARZ	900-123
MARINEBLAU	900-124
Lithium-Ionen-Akku	900-102
Zubehörtasche	900-250
Trolley	900-100
12V Kabel	900-101
Netzkabel	900-105

## TECHNISCHE DATEN

Netzanschluß	Universeller Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,0 A; Ausgang: 18 V DC, 5 A
12V Anschluß	12-18 V DC, 5 A
Stromverbrauch	110 W bei 100 VAC (ladend), 120 W bei 240 VAC (ladend); 70 W (nicht ladend)
Sauerstoffkonzentration	89% +/- 3%
Dosierung der abgegebenen Sauerstoffimpulse	Einstellung von Stufe 1 bis 6 in halben Schritten
Gewicht	4,5 kg mit zwei Akkus, 3,9 kg mit einem Akku
Abmessungen Länge:	30,5 cm
Höhe:	21,6 cm
Akkuleistung Zwei Akkus:	8 Stunden (Stufe 2, 20 Atemzüge/min), ein Akku: 4 Stunden (Stufe 2, 20 Atemzüge/min)
Geräuschpegel 47 dBA typisch für Stufe 2	
Filter	Grobpartikel, Lufteinlassfilter, Micro-Felt-Filter (antibakteriell)
Alarmfunktionen bei fallender Sauerstoffkonzentration	Warnung vor niedrigem Sauerstoffgehalt bei 83 %
Temperaturen, Betrieb	5 °C bis 40 °C
Temperaturen/Luftfeuchtigkeit, Lager und Transport	-20 °C bis 60 °C, bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit, Betrieb	bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Ausgangsdruck	207 mbar (3 psi)
Betrieb:	Höhe über Null Bis zu 2400 m
Alarmer und Anzeigen	Alarm bei verbleibender Akkuleistung von 17 min, Akku-Status auf Touchscreen und auf Akku, Alarm bei ausbleibender Atmung nach zwei Minuten
Sauerstoffkapazität	1,05 l/min (dosierte Sauerstoffimpulse)

## RESPIRONICS®

Kundendienst: +1-724-387-4000  
 Respironics Europa, Afrika, Naher Osten: +33-1-47-52-30-00  
 Respironics Deutschland: +49-81-52-930-60  
 Respironics Frankreich: +33-2-51-89-60-00  
 Respironics Italien: +39-03-62-63-43-1  
 Respironics Großbritannien: +44-800-1300-845  
 Respironics Schweiz: +41-62-745-1750  
 Respironics Asien/Pazifik: +852-3194-2280  
 Respironics Australien: +61-2-9666-4444  
[www.respironics.eu](http://www.respironics.eu)  
[www.respironics.com](http://www.respironics.com)

Respironics ist eine eingetragene Marke und EverGo und Freedom Series sind Marken des Unternehmens Respironics, Inc. und seiner Tochterunternehmen. Geschützt von einem bzw. mehreren Patenten. Weitere Patente angemeldet.

©2008 Respironics, Inc. und Tochterunternehmen.  
 Alle Rechte vorbehalten.

Broudy CY 01/18/08 MCI 4101329 PN 1048703